

# Q & A

## 常见问题汇总



### 关于出行

---

**Q: 我需要有驾照吗?**

A: 不需要。根据道路交通安全法, 视为行人, 请遵守交通规则, 安全出行。

**Q: 可以手动推动吗?**

A: 释放电动刹车即可实现。通常在电动刹车正常运行的情况下, 是不需要手动推动的。  
如果遇到电池没电甚至紧急情况需要手动推动, 请在确保安全的前提下释放刹车。

**Q: 雨淋对设备有影响吗?**

A: 设备具有防水性能, 但请尽量避免在雨中行驶, 因为它可能会在雨天道路上打滑。



### 公共交通工具的使用问题

---

**Q: 可以乘坐地铁吗?**

A: 基本上可以使用。由于地铁和月台之间可能存在缝隙, 请联系车站工作人员协助上下车。另外, 请事先确认站内电梯等无障碍设施。

**Q: 可以乘坐公交吗?**

A: 可以乘坐低底盘公交, 单级台阶公交车或者无障碍公交车。请向公交乘务员寻求帮助。  
详情请联系公交运营商。

**Q: 可以带上飞机吗?**

A: 视航空公司以及您乘坐的机型而定, 请提前与航空公司联系以了解电动轮椅的运输方式。